



**Vink**  
Livestock equipment

**KÉSZENLÉT ZRT.**  
20 éve



# VINK HYDROMATIC lábfürösztő

Ez az áthajtós rendszerű kétcsatornás lábfürösztő berendezés lehetővé teszi a hatékony tisztítást és fertőtlenítést a tehenek áthaladásakor.

A gyógyszeres, vagy a fertőtlenítőszeres kezelés nagy sebességű folyadékárammal éri el a láb és a sarok, az ujjak közötti részeket, ahol hatékonyan távolítja el a szennyeződések, és fertőtleníti a sebeket.


A HYDROMATIC lábfürösztő kétcsatornás rendszere segít a teheneknek az áthaladásban a 3 m hosszú csatornán. Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy a kezelés megfelelő ideig tartson és lekezeljük a lábat alaposan.

A rendszer 15 liter folyadékot használ a működése során, melyet folyamatosan szűri és keringeti. A lábfürösztő saját tartályát automatikusan feltölti az elhasznált mennyiséggel, egy külön tartályból, vagy közvetlenül a hálózati vízről egy vegyszeradagoló segítségével.

A készülék automatikusan bekapcsol, amikor a tehén belép a lábfürösztő tálcába és megkapja a kezelést. A felhasznált folyadékot aztán szitán keresztül szűri egy ecset segítségével, ami eltávolítja a szilárd részeket, így a felhasznált és szűrt folyadék visszakerül a tartályba és újra felhasználásra kerül a következő tehénél.

*A tehenek gyorsan hozzászoknak a lábfürösztő tálcához, de ajánlott, hogy hajtsuk át az állományt kétszer mielőtt üzembe helyezzük a berendezést.*

*A tehenek lassan haladnak át a 3m hosszú tálcán a kétcsatornás rendszernek köszönhetően, így van elég idő az alapos behatásra.*

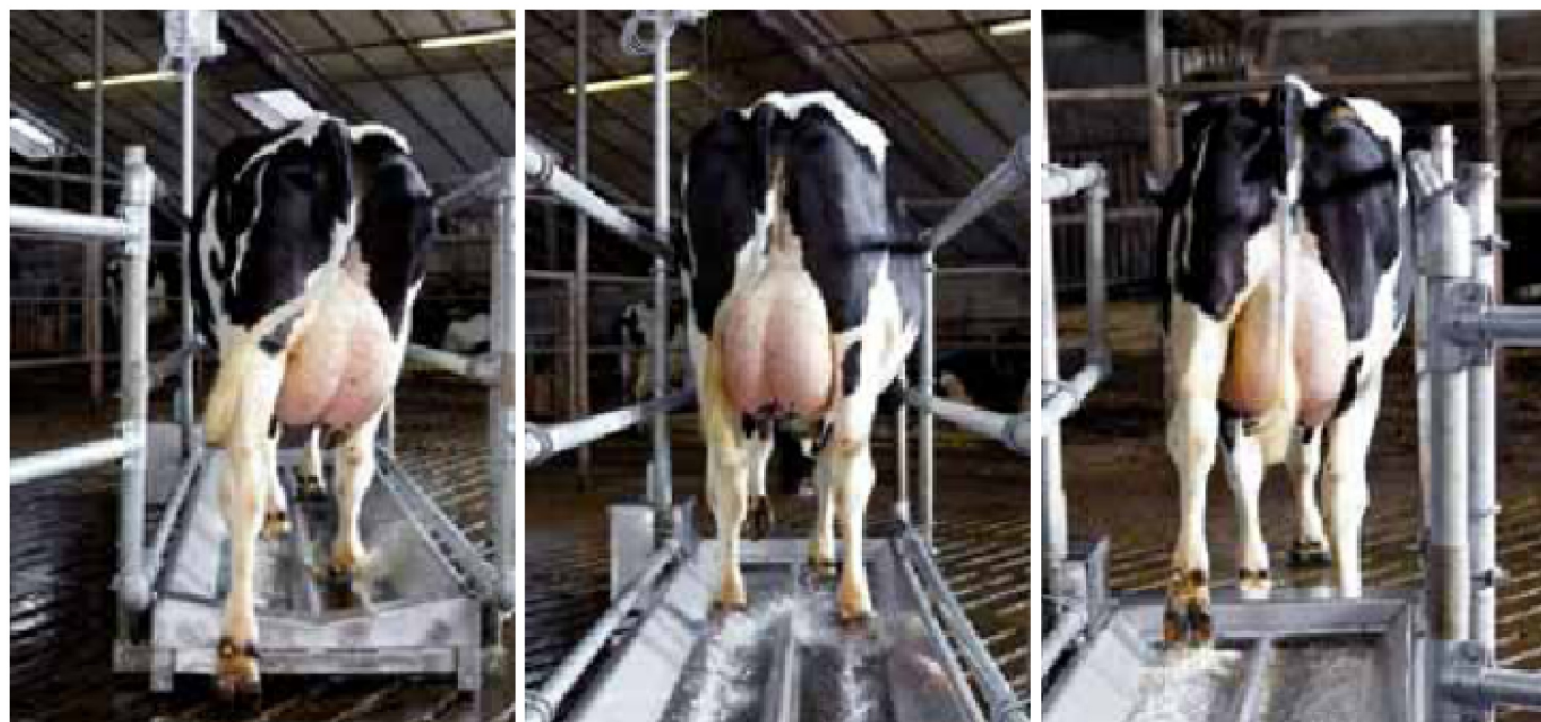




*Amikor a tehenek keresztülhaladnak a csatornákon a folyadékot nagy sebességgel szivattyúzza a rendszer a láb körül, és erőteljesen eltávolítja a szennyeződéseket a sebek és az ujjak közt.*

## **Előnyök:**

- Erőteljes fúvókák permetezik a folyadékot a tehen sarkára, így mély tisztítást érhetünk el a kritikus ujjak közötti térben is.
- A csatornák kialakításának és hosszúságának segítségével a tehenek lassan haladnak, ezért intenzív tisztítás és penetráció érhető el
- A szűrési módszerek mellett folyamatosan friss folyadék kerül a tartályba, így megőrzi minőségét a kezelés az első tehéntől az utolsó tehéig.
- Nincs kézi munka - a rendszer megtisztítja, és feltölti magát automatikusan
- A rendszer szilárd felépítésű, teljes egészében rozsdamentes acélból
- Minden vízben oldódó anyaggal használható
- Víz fogyasztása alacsony - kb. 4 liter (1 gallon) / 5 tehen.

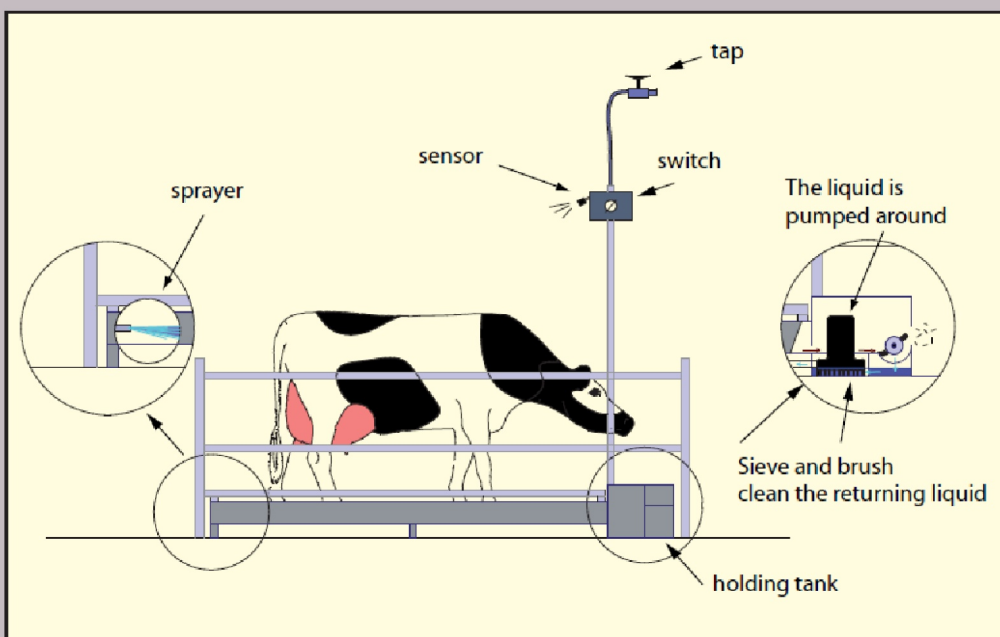

*A rendszer 15 Liter folyadékot használ amit folyamatosan újratölt. Kb ¾ liter felhasználás per tehen.*





### **Pozíció:**

Közvetlenül a fejőház kijáratához  
Ha lehetőség van, akkor úgy kell elhelyezni, hogy amikor használaton kívül van, akkor ki tudja kerülni a tehen.

### **Használat:**

Gyógyító kezelés: 3-7 x hetente  
Megelőző kezelés: 1 x hetente  
A kutatások alapján 6 hét gyógyító kezelés után a tehenek mentesek lesznek a fertőző betegségektől

### **Vízfogyasztás:**

Kb. 4 liter (1 gallon) / 5 tehen.  
Ne feledje, a hydromatic lábfürösztő automatikusan tisztítja a folyadékot és az újrahasznosított és újratölthető folyamatosan.

### **Anyaga:**

A 3,2 méter lábfürösztő teljesen rozsdamentes acél

### **Magyarországi forgalmazó:**

**Vink**  
Livestock equipment

[www.vink-elst.nl](http://www.vink-elst.nl)

**KÉSZENLÉT ZRT.**  
20 éve

8500 Pápa, Mozsár u 14.  
+36 89 510 180  
[www.keszenlet.hu](http://www.keszenlet.hu)  
[strausz.zsolt@keszenlet.hu](mailto:strausz.zsolt@keszenlet.hu)